

엑서사이즈 핸들



구성 : 2개 1세트
(튜브는 별도 구매 상품입니다.)



손의 악력이 약하신 분이나, 재활운동을 하시는 분을 위한 제품입니다.
원하시는 강도의 세라밴드 및 튜빙의 끝을 손쉽게 연결하여 사용하실 수 있습니다.




엑서사이즈 핸들 연결법



01 그림과 같이 연결부위를 늘려주세요.



02 세라밴드 및 튜빙을 순차적으로 돌려서 넣어주세요.
1회~2회 정도 감아주시면 충분합니다.

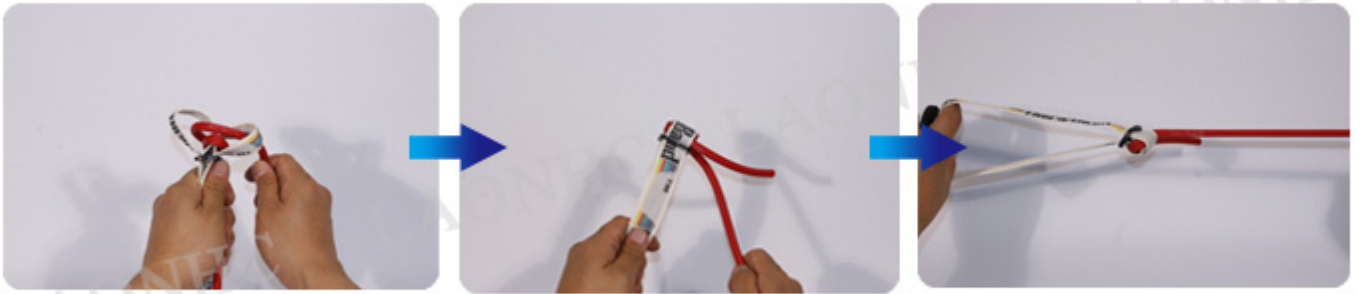

03 버클을 올려주시면, 세라밴드 및 튜빙이 단단히 고정이 됩니다.