

제 품 사 양 서

품 명	저주파 자극기	모델명	H-3000S
		제조국	대한민국

<p>특 징</p> <ul style="list-style-type: none"> - 품목허가번호 : 제허05-333호 - 분류번호 : A16010.01 - 개요 : 본 기기는 저주파를 이용하여 근육통 완화에 사용하는 기기이다. 또한, 스위치 조작을 통해 저주파 전류의 세기/주파수, 작동시간, 흡인모터의 시작/정지, 출력시작/정지 등을 조절할 수 있으며 2개 채널에서 동시에 출력이 가능한 기기이다. 또한 2인에게 동시에 저주파를 가할 수 있으며 2극과 4극 통전이 가능하다. 조작패널, 저주파 전류 발생 부(출력단자 연결부/흡인형 도자/패드), 전원 케이블 연결부로 구성되어 있으며 조작패널에는 INTENSITY 볼륨, BALANCE볼륨, CH 버튼, TIME버튼 표시 부 및 각 종 LED로 구성되어있다. - 석션 + 패드 - AUTO PROGRAM(자동 프로그램) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>프로그램 선택</th> <th>출력 주파수</th> <th>자극 시간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPPER BODY</td> <td>3 ~ 20 Hz</td> <td>10 분</td> </tr> <tr> <td>LOW BODY</td> <td>3 ~ 100 Hz</td> <td>10 분</td> </tr> <tr> <td>WAIST</td> <td>3 ~ 100 Hz</td> <td>15 분</td> </tr> <tr> <td>SPINE W/B</td> <td>5 ~ 100 Hz</td> <td>15 분</td> </tr> <tr> <td>SPINE SOFT</td> <td>2 ~ 14 Hz</td> <td>15 분</td> </tr> <tr> <td>SPINE HARD</td> <td>5 ~ 80 Hz</td> <td>15 분</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - FIXED FREQUENCY PROGRAM (버튼을 1회 누를 때마다 변화) ① PRESSING : 3-7-10-50-100-250-500-1000 Hz ② MASSAGE : 7-10-50-100-250-500-1000 Hz ③ ROLLING : 3-7-10-50-100-250-500 Hz 	프로그램 선택	출력 주파수	자극 시간	UPPER BODY	3 ~ 20 Hz	10 분	LOW BODY	3 ~ 100 Hz	10 분	WAIST	3 ~ 100 Hz	15 분	SPINE W/B	5 ~ 100 Hz	15 분	SPINE SOFT	2 ~ 14 Hz	15 분	SPINE HARD	5 ~ 80 Hz	15 분	
프로그램 선택	출력 주파수	자극 시간																				
UPPER BODY	3 ~ 20 Hz	10 분																				
LOW BODY	3 ~ 100 Hz	10 분																				
WAIST	3 ~ 100 Hz	15 분																				
SPINE W/B	5 ~ 100 Hz	15 분																				
SPINE SOFT	2 ~ 14 Hz	15 분																				
SPINE HARD	5 ~ 80 Hz	15 분																				

<p>사 양</p> <ul style="list-style-type: none"> - 치 수 : ① 본체 450 × 350 × 160 (단위 : mm) <li style="padding-left: 20px;">② 흡인형 도자 Ø75 × 45 ③ 저주파 패드 116 × 75 - 본체 중량 : 13Kg - 성 능 : ① 전기적 정격: 입력 AC 220V, 60Hz, 40W <li style="padding-left: 20px;">② 전기충격에 대한 보호 형식 및 정도 : 1급 기기, BF형 기기 <li style="padding-left: 20px;">③ 최대 출력 전류 : 40mA (최대 출력모드 245Hz 일 경우) <li style="padding-left: 20px;">④ 출력 전압 : 110Vp-p <li style="padding-left: 20px;">⑤ 설정 시간 : 0~15분 <li style="padding-left: 20px;">⑥ 흡인 압력 : 최대 250mmHg 	
--	--

구 성	- 본체 1set , 흡입도자 1set, 케이블 1set, 패드도자 2set, 흡입스폰지 4ea, 고정밴드 2set
------------	--